



lifecek

BPM653-00S Hata Kodları

- Türkçe / İngilizce Konuşma Özelliği
Turkish / English Talking Function
- Geniş LCD Ekran
Wide LCD Display
- Düzensiz Kalp Ritmi Tespiti
Irregular Heartbeat Detector
- 2 Kullanıcı İçin 60 Hafıza Kaydı
60 memory records for 2 users
- 3 Alarm Ayan
3 Alarm Setup

KATEGORİ	SORUN/HATA KODU	OLASI SEBEPLER	ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
GENEL SORUNLAR	Cihaz açılmasına rağmen ekranda bir şey görünmüyor.	Piller tükenmiştir. Pillerin kutupları doğru hizalanmamıştır.	Pilleri yenisi ile değiştiriniz. Pilleri doğru konumda olacak şekilde yeniden takınız.
GENEL SORUNLAR	Pil düşük sembolü görünüyor.	Piller tükenmiştir. Düşük sıcaklıklarda piller daha zayıf elektrik yüküne sahip olmaktadır.	Pilleri yenisi ile değiştiriniz. Pilleri ısıtınız ya da cihazı daha sıcak bir ortamda kullanınız.
GENEL SORUNLAR	Cihaz çalışma süresi istikrarsız	Farklı pil markalarının ömürleri farklıdır.	Alkalın pil kullanınız ve tüm pilleri aynı marka olacak şekilde değiştiriniz.
GENEL SORUNLAR	Ölçüm sonucu okunmuyor	Piller tükenmiştir.	Pilleri yenisi ile değiştiriniz.
GENEL SORUNLAR	Şüpheli kan basıncı sonuçları	Manşon yanlış yerleştirilmiş olabilir. Kan basıncı gün içerisinde doğal olarak değişiklik göstermektedir.	Ölçüm için hasta ve manşonu ayarlayınız. Bir süre dinlendikten sonra rahatlayıp tekrar ölçüm gerçekleştiriniz.
GENEL SORUNLAR	Şüpheli nabız sonuçları	Cihazı kullanırken hareket edilmiştir. Egzersizin hemen ardından ölçüm gerçekleştirilmiştir.	Ölçüm sırasında hareket etmekten kaçınınız. Egzersizden sonra yada dışarıdan geldikten hemen sonra ölçüm gerçekleştirmeyiniz.
GENEL SORUNLAR	Cihaz otomatik olarak kapanıyor.	Sistemin kendi özelliğidir.	Power(Güç) butonuna tekrar basınız ve tekrar ölçüm gerçekleştiriniz.
GENEL SORUNLAR	Ölçüm sırasında manşon yeniden şişmeye başlıyor	Kullanıcının kan basıncı önceki sonuç değerinden daha yüksek ise normal olabilir cihaz her 40 mmHg'de bir daha yüksek basınca çıkmaktadır. Kol manşonu düzgün bağlanmamıştır.	Rahatlayın ve yeniden ölçüm gerçekleştiriniz. Kol manşonunun düzgünce yerleştirildiğinden emin olun ve tekrar ölçüm gerçekleştiriniz.
GENEL SORUNLAR	Cihaz ölçüme başlarken kapanıp tarih ayar bölümüne geçiyor	Cihazın pilleri bittiğinde bu durum gözlemlenmektedir.	Yeni piller takarak tekrar deneyiniz.
HATA KODLARI	Err 0	Nabız yok ya da nabız yeteri kadar tespit edilemiyor	Kalın kıyafetlerinizi çıkarın ve yeniden ölçüm gerçekleştirin.
HATA KODLARI	Err 1	Manşon basıncında hava kaçırma / çok zayıf basınç	Manşon düzgünce yerleştirilmemiş olabilir. Manşonu yeniden yerleştirerek tekrar ölçüm yapın.
HATA KODLARI	Err 2	Basınç hatası	Bir süre dinlenin, rahatlayın ve yeniden ölçüm gerçekleştirin.
HATA KODLARI	Err 3	Manşon sönme (deflasyon) hatası	Manşon düzgünce yerleştirilmemiş olabilir. Manşonu yeniden yerleştirerek tekrar ölçüm yapın.
HATA KODLARI	Err	Hafıza hatası	Cihazı yeniden başlatmak için pilleri çıkarıp yeniden takın ve sonrasında yeniden ölçüm gerçekleştirin.
HATA KODLARI	Err 255	Sistem arızası	Teknik servise yollanması gerekmektedir