

lifecheck

JXB-315

Infrared Uzaktan Ateş Ölçer



KULLANIM KILAVUZU

NOT:

Lifecheck JXB-315 Infrared Uzaktan Ateş Ölçer'i kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu okuyunuz ve tüm talimatlara uyunuz. Kullanım kılavuzunu daha sonra kullanmak için saklayınız. Her kullanımdan önce cihaz işlevlerini bu kullanım kılavuzuna göre kontrol ediniz ve bu cihazı sadece uygun çalışma koşullarında kullanınız.

İçerik

I. KULLANIM AMACI	1
II. UYARILAR VE ÖNLEMLER	2
III. INFRARED UZAKTAN ATEŞ ÖLÇER ÇALIŞMA PRENSİBİ	2
IV. ÜRÜN AÇIKLAMASI	3
V. LIFECHECK JXB-315 INFRARED UZAKTAN ATEŞ ÖLÇER'İN KULLANIMI	3
VI. ATEŞ ÖLÇERİN AÇILMASI VE AYARLANMASI	4
VII. TEKNİK ÖZELLİKLER	4
VIII. PİL	5
IX. KUTU İÇERİĞİ	5
X. TEMİZLİK VE BAKIM	6
XI. SORUN GİDERME	6
XII. SEMBOLLER VE İŞARETLER	7
XIII. EMC BEYANI	8
XIV. GARANTİ VE TEKNİK SERVİS	9
XV. İMHA	10

I. Kullanım Amacı

Cihaz, insan vücudu ile temas etmeden her yaştan bireyin kullanımına uygun olarak alın sıcaklığını ölçmek için tasarlanmış bir ateş ölçerdir. Ev ortamında ve doktor tarafından klinikte referans olarak kullanılabilir.

- Cihazı, kullanma talimatını okuduktan ve anladıktan sonra kullanınız.
- Cihazı yalnızca kullanım kılavuzunda belirtildiği gibi kullanınız, herhangi bir yanlış kullanım garantiyi geçersiz kılar.
- Cihaz, sağlık profesyonelleri ve kişisel ev kullanımı için uygundur.
- Cihaz, doktora danışmanın ya da tıbbi yardım almanın yerini tutmaz. Kendi ölçümlerinize dayanarak, doktorunuza danışıp onay almadan kendinize teşhis koymayınız ve kendinizi tedavi etmeyiniz. Özellikle, doktorunuza danışıp onay almadan ilaçlarınızı veya ilaçlarınızın dozunu değiştirmeyiniz.
- Cihaz yetişkinler tarafından kullanılmalı ve çocuklardan uzak tutulmalıdır.
- Çocukların cihazı denetimsiz olarak kullanmadığından emin olunuz. Bazı parçalar boğulma tehlikesi yaratacak veya yutulabilecek kadar küçüktür.
- Cihazı kullandığı yerden daha sıcak veya daha soğuk bir alanda saklıyorsanız, kullanmadan en az 30 dakika önce kullanacağınız alana konumlandırınız.
- Fiziksel aktivitelerden, duştan veya yürüyüşten sonra yaklaşık olarak 30 dakika bekleyerek ölçüm yapınız.
- Doğru sonuç almak için kapalı ortamda ve 10 °C (50 °F) - 40 °C (104 °F) sıcaklıkları arasında ölçüm yapılmalıdır.
- Her kullanımdan önce ve sonra, bakteriyel enfeksiyonlardan kaçınmak için kullanım kılavuzundaki temizlik talimatlarını uygulayınız.
- Cihazı elektrik akımına maruz bırakmayınız.
- Cihazı 55 °C (131 °F) yüksek sıcaklığa veya -20 °C (-4 °F) düşük sıcaklığa maruz bırakmayınız.
- Cihazı %85 bağıl nemin üzerinde kullanmayınız.
- Cihazı direkt güneş ışığına, çok yüksek veya çok düşük ısıya, kir veya toza maruz bırakmayınız.
- Cihazı düşürmeyiniz.
- Cihazın sensörüne parmağınızı sokmayınız, sensör kırılabilir ve yaralanmaya neden olabilir.
- Cihaz hasarlıysa kullanmayınız.
- Cihazın içini açmayınız. Küçük parçalar içerir ve çocuklar tarafından yutulabilir.
- Cihazı suya veya başka bir sıvıya maruz bırakmayınız. Cihaz suya dayanıklı ya da su geçirmez değildir.
- Cihazı uzun süre kullanmak istemiyorsanız pilleri çıkarınız, aksi halde pillerin akma tehlikesi vardır.
- Cihazı mikrodalga fırın, kaynak makinesi ya da induksiyon ısıtıcı gibi nesneler tarafından üretilen elektromanyetik alanlardan uzak tutunuz.
- Cihaz beklenen kullanım ömrüne (üretildiği tarihten itibaren 5 yıl) ulaştığında yeniden kullanılmamalıdır. İmha detayları için XV. bölüme bakabilirsiniz.
- Elektronik bileşenler ve piller yüksek miktarda metal veya kimyasal içerdiğinden dolayı çevreye zarar verebilir. İmha için lütfen yasal düzenlemeleri uygulayınız.
- Bir hata ya da hasar olduğunda, cihazı kendiniz onarmayınız, bu garantiyi geçersiz kılacaktır. Onarım için satıcınıza danışınız.

III. Infrared Uzaktan Ateş Ölçer Çalışma Prensibi

Katı, sıvı ve gaz halinde tüm cisimler radyasyon yoluyla enerji yayarlar. Bu enerjinin yoğunluğu, cismin sıcaklığına bağlıdır. Bu nedenle Infrared Uzaktan Ateş Ölçer kişinin yaydığı enerjiyi algılayarak vücut sıcaklığını ölçebilir. Bu ölçüm, cihaz üzerinde bulunan ve ortam sıcaklığını analiz eden harici sıcaklık sensörü sayesinde yapılır ve kullanıcısı ölçeri vücuduna yakın tutup çalıştırdığı anda, arteriyel kan akışının ürettiği kızılötesi ışınları algılayarak anında ölçüm yapılabilir. Böylece çevresel etki faktörlerinin etkisi olmadan vücut ısı ölçülebilmektedir.


Not: Infrared Uzaktan Ateş Ölçer için referans vücut sıcaklığı, koltukaltı bölgesi sıcaklığıdır.

Klinik Tekrarlanabilirlik	≤0.2°C(0.4°F)
Ekran Çözünürlüğü	0.1°C(0.1°F)
Ölçüm Süresi	1 Saniye
Hafıza	32 Ölçüm
Normal Kullanım Koşulu	Ortam Sıcaklığı Modu 10.0°C ~ 40.0°C (50°F ~ 104°F) Bağıl Nem: ≤85%RH Başıncı Yüksekliği 700 hPa to 1060 hPa
Saklama ve Taşıma Koşulu	Ortam Sıcaklığı Modu -20°C ~ 55°C (-4°F ~ 131°F) Bağıl Nem: ≤ 95%RH Başıncı Yüksekliği 700 hPa to 1060 hPa
Ağırlık	(Pil Hariç) 66 gr
Cihaz Boyutu	145x40x32 mm (U x G x Y)
Tahmini Kullanım Ömrü	Lifecheck JXB-315 Infrared Uzaktan Ateş Ölçer üretim tarihinden itibaren 5 yıla kadar kullanılabilir ancak bu garanti edilemez.
Otomatik Kapatma	≤30 Saniye
Ölçüm Alanı	Alın
Vücut Referans Noktası	Koltuk Altı
Çalışma Şekli	Ayarlanmış Mod

VIII. Pil

1. Pillerin Değiştirilmesi

Pillerin değiştirilmesi gerektiğinde LCD ekranda " " sembolü görüntülenir. Pilleri değiştirmek için kapağı doğru şekilde açınız ve doğru konumlandırmaya özen göstererek pilleri yerleştiriniz. Bununla ilgili bir hata aparata zarar verebilir. Asla şarj edilebilir piller kullanmayınız. Tek kullanımlık piller kullanınız..

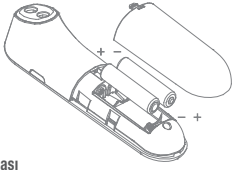

2. Pillerin Atılması

Çevrenin korunması için boş pilleri ulusal ve yerel düzenlemelere göre ayrılmış toplama yerlerine atınız.

Pillerin muhafazasına ilişkin notlar

Cildiniz veya gözleriniz pil sıvısı ile temas ettiğinde, etkilenen bölgeyi su ile temizleyiniz ve tıbbi yardım isteyiniz.

Boğulma tehlikesi!

Pilleri çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza ediniz, çocuklar pilleri yutabilir ve bu boğulma tehlikesine sebep olabilir. Pil sızıntı yapıyorsa, koruyucu eldiven takarak kuru bezle pil bölmesini temizleyiniz. Pilleri yüksek ısıdan koruyunuz.

Patlama riski!

Pilleri ateşe atmayınız. Yalnızca aynı veya benzer pil türlerini kullanınız. Pilleri her zaman aynı anda değiştiriniz. Şarj edilebilir piller kullanmayınız. Pilleri sökmeyiniz, ayırmayınız veya ezmeyiniz.

IX. Kutu İçeriği

Lifecheck Infrared Uzaktan Ateş Ölçer 1 Adet
Kullanma kılavuzu 1 Adet
AAA Pil 2 Adet

X. Temizlik ve Bakım

Ateş ölçer birden fazla hasta için yeniden kullanılabilen bir cihazdır. Temizleme ve dezenfeksiyon talimatları doğrulanmıştır. Kullanmadan önce ateş ölçerinizi temizlemek / dezenfekte etmek için lütfen talimatları izleyin.

Temizlik:

- 1) Cihazın ve ölçüm sensörünün üzerindeki leke veya kiri çıkarmak için sıcak su veya saf deterjan ile nemlendirilmiş pamuklu çubuk kullanınız.
- 2) Temizleme işleminden sonra ateş ölçeri görsel olarak inceleyiniz, leke veya kir kalmadığından emin olunuz. Temizleme adımının sonunda cihazın görsel olarak temiz olmadığı belirlenirse, ya önceki temizleme adımlarını tekrarlayınız ya da cihazın bir daha kullanılmaması için cihazı güvenli bir şekilde imha ediniz.

Dezenfeksiyon:

- 1) Cihaz kasası ve ölçüm sensörünü %75 izopropil alkolle batırılmış pamuklu çubuk veya temiz bir bez ile 30 saniye boyunca dezenfekte ediniz.
- 2) Yukarıdaki adımları en az 3 kez tekrarlayınız. İşlem bittiğinde yüzeyi siliniz ve temiz bir bezle sensörü kurulayınız. Dezenfeksiyon işleminden sonra yaklaşık bir dakika kurumasını bekleyiniz.

Not:

- Cihazın iç kısmına sıvı teması olmadığından emin olunuz.
- Asla ağır kimyasal temizlik maddeleri, tiner, benzin veya sert fırçalar kullanmayınız. Cihazı suya veya temizleyici sıvılara batırmayınız.
- Cihazın sensör camını ve ekranını çizmemeye özen gösteriniz.
- Cihazı görsel olarak incelediğinizde çatlak, kırık gibi hasar tespit etmeniz durumunda tekrar kullanmayınız.
- Cihaz hastalarda kullanıldıysa, lütfen her kullanımdan sonra cihazı görsel olarak kontrol ederek gövdesinde ve sensöründe leke veya yağ olup olmadığını belirleyiniz.

Bakım ve Onarım:

- Lütfen cihazı ayda bir temizleyiniz.
- Eğer sensör hasarlıysa, lütfen teknik servis ile iletişim kurunuz.
- Eğer cihazı iki aydan uzun süredir kullanmıyorsanız, lütfen pilleri değiştiriniz.
- Cihazı toz ve kirden uzak, doğrudan güneş ışığı almayan kuru bir alanda saklayınız.
- Lütfen önerilenin haricinde veya şarj edilebilir pil kullanmayınız. Cihazı ateşe atmayınız.
- Cihazı güneş ışığı veya suya maruz bırakmayınız.
- Cihazı dikkatli kullanınız. Düşme, çarpma ve şiddetli darbe cihaza zarar verecektir.

Kalibrasyon:

Bu cihaz fabrikadan çıktığı anda kalibrasyonu yapılmış olarak gelmektedir. Eğer cihaz talimatlara uygun olarak kullanılıyorsa düzenli kalibrasyon yapmanız gerekmemektedir. Eğer ölçüm konusunda sorun yaşıyorsanız, teknik servis ile iletişime geçiniz. Cihazı kendinizin tamir etmeye çalışmayınız. Cihazı kalibre etmek için özel kalibrasyon ekipmanı gereklidir.

XI. Sorun Giderme

Eğer cihazı kullanırken sorun yaşıyorsanız, lütfen sorunu çözmek için kılavuzdaki talimatları uygulayınız. Eğer sorun çözülmez ise lütfen teknik servise ile iletişimi kurunuz.

Ekran'da HI mesajı görüntüleniyor ise:

Ekran'da görülen "HI" mesajı Vücut (Body) modunda 43 °C'nin (109,4 °F) üstünde ölçüm yapıldığını göstermektedir. Ekran'da görülen "HI" mesajı Yüzey (Surface) modunda 60 °C'nin (140 °F) üstünde ölçüm yapıldığını göstermektedir.

Ekran'da görülen "HI" mesajı Oda (Room) modunda 40 °C'nin (104 °F) üstünde ölçüm yapıldığını göstermektedir.

Ekran'da LO mesajı görüntüleniyor ise:

Ekran'da görülen "LO" mesajı Vücut (Body) modunda 32 °C'den (89,6 °F) daha düşük sıcaklık ölçüldüğünü göstermektedir.

Ekranda görülen "LO" mesajı Yüzey (Surface) modunda 0 °C'den (32°F) daha düşük sıcaklık ölçüldüğünü göstermektedir.
Ekranda görülen "LO" mesajı Oda (Room) modunda 0 °C'den (32 °F) daha düşük sıcaklık ölçüldüğünü göstermektedir.

Bununla birlikte "LO" mesajı aşağıda belirtilen nedenlerle de görüntülenir.

LO Mesajının Olası Nedenleri	Çözüm Önerileri
Saç veya ter sıcaklık ölçümünü engellemektedir.	Ölçüm için herhangi bir engel ve nem olmadığından emin olun.
Hava akımı veya ani değişiklikler ile ortam sıcaklığındaki ani düşüşler.	Kullanım alanında hava akımı olmadığından emin olun.
Birbirine çok yakın sürelerde ölçüm yapılması ve ateş ölçerin tekrar ölçüm yapması için yeterli zaman olmaması.	Art arda yapılan ölçümlerde en az 3-5 saniye süre olmalı. İki ölçüm arası önerilen süre 15 saniyedir.
Ölçüm mesafesinin çok uzak olması.	Ölçümleri önerilen mesafeden yapın (0-3 cm (0-1.2 inç)).

XII. Semboller ve İşaretler

Sembol	Sembol Açıklaması
	Marka
	Kullanıcının kullanım talimatlarına veya uyulması gereken özel uyarı ve önlemler gibi dikkat edilmesi gereken bilgilere başvurması gerektiğini belirtir. Bu bilgiler, tıbbi cihazın kendisinde sunulabilir.
	Kullanım kılavuzunu referans alın.
	İec 60417-5333, Tipi Ekipman
	İEC 60417-5031 Doğru akım
IP22	Zararlı su ve partikül madde girişine karşı koruma derecesi 12,5 mm ve daha büyük katı yabancı cisimlere karşı korumalıdır. 15°'ye kadar açılı olduğunda dikey olarak düşen su damllarına karşı koruma
	BERTARAF: Bu ürünün sınıflandırılmamış kentsel atık olarak atmayın. Bu tür atıkların özel ayrıştırma için ayrı ayrı toplanması zorunludur.
	Üretici
	Seri Numarası
	Üretim Tarihi
	Model Numarası
	Üretim Yeri
	Medikal Cihaz
	Benzersiz Cihaz Tanımlama
	Avrupa Topluluğunda Yetkili Temsilci

	CE işareti, tıbbi olarak ürünler için 93/42/EEC direktifinin temel şartları ile uyumluluğunu belgeler
	İthalatçı

XIII. EMC Beyanı

ME ekipmanı veya ME Sistemi evde sağlık hizmetleri ve klinik ortamlar için uygundur.

Uyarı: EM bozuluklarının yoğunluğunun yüksek olduğu aktif HF cerrahi ekipmanına ve manyetik rezonans görüntüleme için ME sisteminin RF korumalı odasına yaklaşmayın.

Uyarı: Bu cihazın diğer ekipmanlarla bitişik veya üst üste kullanılmamasından kaçınılmalıdır çünkü bu, hatalı çalışmaya neden olabilir. Böyle bir kullanım gerekli olması durumunda, cihaz ve diğer ekipmanların normal şekilde çalıştıklarının doğrulanması için gözlemlenmesi gerekir.

Uyarı: Bu cihazın üreticisi tarafından belirtilenler dışındaki aksesuarların, dönüştürücülerin ve kabloların kullanılması, cihazın elektromanyetik emisyonlarının artmasına veya elektromanyetik bağışıklığının azalmasına neden olabilir ve hatalı çalışmaya neden olabilir.

Uyarı: Taşınabilir RF iletişim ekipmanı (anten kabloları ve harici antenler gibi çevre birimleri dahil), üretici tarafından belirtilen kablolar da dahil olmak üzere JXB-315 ekipmanının herhangi bir parçasına 30 cm den (12 inç) daha yakın kullanılmamalıdır. Aksi takdirde cihazın performansında düşüş meydana gelebilir.

1. Tüm talimatlar TEMEL GÜVENLİK ve GEREKLİ PERFORMANS koşullarının tahmini kullanım süresi boyunca elektromanyetik etkiler olmadan sürdürülebilmesi içindir. Taşınabilir ve mobil RF iletişim ekipmanı, JXB-315'in performansını etkileyebilir. Cihazı kullanırken cep telefonları, mikrodalga fırınlar gibi güçlü elektromanyetik alan yaratan cihazlardan uzak tutunuz.

2. Rehber ve Üreticinin Beyanı - Elektromanyetik Bağışıklık

Rehber ve Üreticinin Beyanı - Elektromanyetik Bağışıklık

Tablo 1

Rehber ve Üreticinin Beyanı - Elektromanyetik Bağışıklık	
Bağışıklık Testi	Uygun Seviyesi
RF Emisyonu CISPR 11	Grup 1
RF Emisyonu CISPR 11	B Sınıfı
Harmonik Emisyon IEC 61000-3-2	Uygulanabilir Değil
Voltaiz Dalgalanmaları / Titreşim Emisyonları IEC 61000-3-3	Uygulanabilir Değil

Tablo 2

Rehber ve Üreticinin Beyanı - Elektromanyetik Bağışıklık		
Bağışıklık Testi	IEC 60601 Test Seviyesi	Uyum Seviyesi
Elektrostatik Deşarj (ESD) IEC 61000-4-2	± 8 kV Temas ± 2 kV ± 4 kV ± 8 kV ± 15 kV Hava	± 8 kV Temas ± 2 kV ± 4 kV ± 8 kV ± 15 kV Hava
Elektrik Hızlı Geçici / Patlama IEC 61000-4-4	Uygulanabilir Değil	Uygulanabilir Değil
Gerilim IEC 61000-4-5	Uygulanabilir Değil	Uygulanabilir Değil

Güç kaynağı giriş hatlarında voltaj düşüşleri, kısa kesintiler ve voltaj değişimleri IEC 61000-4-11	Uygulanabilir Değil	Uygulanabilir Değil
Manyetik Alan Güç Frekansı (50/60 Hz) IEC 61000-4-8	30 A/m 50Hz/60Hz	30 A/m 50Hz/60Hz
İletilen RF IEC 61000-4-6	Uygulanabilir Değil	Uygulanabilir Değil
RF IEC 61000-4-3 yayan	10 V/m 80 MHz - 2,7 GHz 80 % AM at 1 kHz	10 V/m 80 MHz - 2,7 GHz 80 % AM at 1 kHz

NOT: UT Test seviyesinin uygulanmasından önce şebeke gerilimi.

Tablo 3

Rehber ve Üreticinin Beyanı - Elektromanyetik Bağışıklık							
Radiated RF IEC61000-4-3 (RF kablolu iletişim cihazlarına yapılan Port Bağışıklık Testi sonuçları)	Test Frekansı (MHz)	Bant (MHz)	Servis	Modülasyon	Modülasyon	Mesafe (m)	Bağışıklık Test Seviyesi (VM)
	385	380 390	TETRA 400	Nabız modülasyon 18 Hz	1.8	0.3	27
	450	430 470	GMRS 460, FRS 460	FM ± 5 kHz sapma 1 kHz sine	2	0.3	28
	710	704 787	LTE Band 13,17	Nabız modülasyon 217 Hz	0.2	0.3	9
	745						
	780						
	810						
	870	800 960	GSM 800/900, TETRA 800, IDEN 820, CDMA 850, LTE Band 5	Nabız modülasyon 18 Hz	2	0.3	28
	930						
	1720	1700 1990	GSM 1800; CDMA 1900; GSM 1900; DECT; LTE Band 1, 3, 4, 25; UMTS	Nabız modülasyon 217 Hz	2	0.3	28
	1845						
	1970						
	2450	2400 2570	Bluetooth, WLAN, 802.11 b/g/n, RFID 2450, LTE Band 7	Nabız modülasyon 217 Hz	2	0.3	28
	5240	5100 5800	WLAN 802.11 a/n	Nabız modülasyon 217 Hz	0.2	0.3	9
5500							
5785							

XIV. Garanti ve Teknik Servis

Sürekli ürün geliştirme politikamız gereği, önceden haber vermesizsin teknik ve görsel değişikliklik yapma hakkımız saklıdır.

Garanti ve Onarım Şartları

Garanti Süresi: 24 ay

Garanti kapsamında bir talep olması durumunda lütfen satıcınızla veya servis merkeziyle iletişime geçiniz. Cihazı iade etmeniz gerekiyorsa lütfen faturanızın bir kopyasını ekleyiniz ve kusurun ne olduğunu belirtiniz.

Aşağıdaki garanti koşulları geçerlidir:

1. Lifecheck ürününün garanti süresi satın alma tarihinden itibaren 24 aydır. Garanti talebi için satın alma tarihinin satış fişi veya fatura kullamları kanıtlanması gerekir.

2. Garanti süresi içerisinde ürün veya içiçlikteki kusurlar ücretsiz olarak giderilecektir.

3. Garanti kapsamındaki onarımlar, cihazın veya yedek parçaların garanti süresini uzatmaz.

4. Aşağıdakiler garanti kapsamı dışındadır:

- Uygunuz kullanımla nedeniyle ortaya çıkan tüm hasarlar, örn. Kullanıcı talimatlarına uyulmaması.
- Müşteri veya yetkisiz üçüncü şahıslar tarafından yapılan onarımlar veya müdahalelerden kaynaklanan tüm hasarlar.
- Üreticiden tüketiciye taşıma sırasında veya servis merkezine taşıma sırasında ortaya çıkan hasarlar.
- Kullanımdan kaynaklı aşınma ve yıpranmaya maruz kalan aksesuarlar.
- Cihazda meydana gelen hasar, garanti talebi olarak kabul edilse bile, cihazın neden olduğu doğrudan veya dolaylı kayıplara ilişkin sorumluluk yetkili firma tarafından üstlenilmez.

XV. İmha

Cihazı direkt olarak çöpe atmayınız. Eski elektrikli ve elektronik cihazlara ilişkin 2012/19/AB Direktifi ve Ulusal İmha Düzenlemeleri uyarınca, bu tür cihazların Avrupa Birliği (AB) kuralları dahilinde özel bir şekilde imha edilmesi gerektiğini lütfen unutmayın. Bu düzenlemeler, eski elektrikli ve elektronik cihazların çevre dostu bir şekilde geri dönüştürülmesini / atılmasını gerektirmektedir. Bu tür eşyalar ev çöpi olarak atılmamalıdır. Bu, "üstü çizili çöp kutusu" simgesi kullanılarak ifade edilmiştir.




Lifecheck JXB-315 Infrared Uzaktan Ateş Ölçer piller ve geri dönüştürülebilir elektronik atıklar içerir. Çevreyi korumak için, bunları evsel atıklarla birlikte atmayın, ayrı olarak toplayın ve uygun bir yerel toplama merkezine götürün.

Lifecheck JXB-315 Infrared Uzaktan Ateş Ölçer, 2012/19/AB Direktifinin ANNEX IV'üne göre (5.kategori) küçük ekipman olarak sınıflandırılmıştır.

Lütfen cihazı imha etmeden önce pilleri çıkarttığınızdan emin olunuz. Cihazı ve pilleri ayrı ayrı imha ediniz. Pilleri aşağıdaki adımları takip ederek çıkartabilirsiniz:

>> Pili Çıkartma Şeması

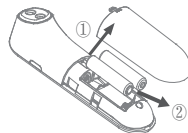

① Cihazın arkasındaki kapağı açınız.

② Pilleri sökünüz.

Pilleri sağlık ve çevre için tehlike oluşturun! Pilleri asla açmayın, yutmayın ve çevreye zarar vermelerine izin vermeyin. Toksik ve ekolojik olarak zararlı metaller içerebilirler. Piller yasal mevzuata göre imha edilmelidir.



B.E.K. Sağlık Ürünleri Eğitim Turizm Emlak ve Danışmanlık Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Panayır Mah. Pelin Sokak No: 5-7/B Ösmangazi / Bursa / Türkiye
Tel: +90 444 9 235 e-posta: info@farmasyon.com.tr
www.lifecheck.com.tr



Guangzhou Berrcom Medical Device Co. Ltd.
No.38 Huanzhen Xi Road, Dagang Town, Nansha, 511470
Guangzhou, Guangdong, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Tel: +86(20)34938449 Fax: +86(20)34936960



Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Eiffestrasse 80, 20537, Hamburg, Germany